

**1·DAY ACUVUE®**  
**TruEye™**  
BRAND CONTACT LENSES












# Használati útmutató

Egynapos kontaktlencsékhez

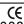

CE  
0086

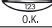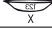Az alábbi szimbólumok jelenhetnek meg a címkéken vagy dobozokon:

SZIMBÓLUM	DEFINIÇÃO
	Lásd a használati utasítást!
	Lejárat dátum
	Gyártási tétel száma
	Gőzzel vagy száraz hővel sterilizált
DIA	Átmérő
BC	Bázisgörbület
D	Dioptria (a lencse erőssége)
CT	Középvastagság
 0086	„CE” megfelelési jelölés
	UV-szűrés
	A hátsó fóliát távolítsa el!
	Helyes lencseállítás
	Kifordított lencse
	Környezetvédelmi termék
	Figyelmeztetés: AZ USA törvényei szerint ezt a terméket csak az erre jogosult kontaktlencse-illesztő értékesítheti.

# TARTALOM

1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencse	4
Figyelmeztetések – amit a kontaktlencse viselésről tudnia kell	6
Tisztítás	7
A kontaktlencse csomagolása	8
A lencsék felhelyezése előtt	9
A lencsék felhelyezése a szemre	10
A lencsék középre igazítása	12
A letapadó (el nem mozduló) lencsék kezelése	13
A lencsék eltávolítása	14
A lencsék ápolása	16
Monovision korrekcióra vonatkozó utasítások	18
Biztonsági ellenőrzés	19
Egyéb fontos információk	20
Összefoglaló áttekintés	22
Mellékhatások	23
Az Ön adatlapja	24



# 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencse

## Kényelmes, könnyen használható

Gratulálunk Önnek, hogy a világ vezető kontaktlencsegyártójának 1•DAY ACUVUE® TruEye™ márkájú kontaktlencséit választotta. A 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsék lágyak, vékonyak és rugalmasak. Ez kezdettől fogva kényelmessé teszi viselésüket, és biztosítja a folyamatos oxigénellátást, így szemei frissek és egészségesek maradnak. Ezenkívül a lencsék az ultraibolya-sugarak (UV) ellen is védelmet nyújtanak.\*

A könnyebb kezelhetőség érdekében a 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsék enyhe színezettséggel rendelkeznek, és megtalálható rajtuk egy jelzés, amely megmutatja, ha a lencse kifordított helyzetben van.

A 1•DAY ACUVUE® TruEye™ minőségű kontaktlencsék létrehozásához jelentős technológiai áttörésekre volt szükség a speciális anyagtulajdonságok megvalósításához egy olyan lencsénél, amellyel minden napot egy új és friss lencsével kezdeni lehet. Ez azt jelenti, hogy a lencsét még az előtt lecserélheti, mielőtt a lerakódások és az öregedés hatásai csökkentenék a hatékonyságát. Így minden nap biztosított a kiváló kényelem, látás és egészség. Mivel minden egyes lencse ugyanazzal a technológiával készül, ugyanazt a minőséget és kényelmet élvezheti minden alkalommal, amikor egy új párat illeszt.

Mint minden kontaktlencse, a 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencse is gyógyászati segédeszköz. A kontaktlencse illesztő által nyújtott folyamatos tanácsadás és a rendszeres szemvizsgálat alapvető fontosságú ahhoz, hogy hosszú távon is megóvja egészségét és látását.

A 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsék nappali viseletre és egyszeri használatra tervezték, ahogy azt a kontaktlencse illesztője is jelezte.

Mindig kövesse a kontaktlencse-illesztője által javasolt viselési ütemtervet.

A 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsék védelmet nyújtanak a szaruhártyának és a szemnek a káros UV sugarakkal szemben.\*

### **MEGJEGYZÉS:**

Az UV sugárzásnak való hosszabb kitettség a hályogok kialakulásához társított egyik kockázati tényező. A kitettség mértéke számos környezeti (tengerszint feletti magasság, földrajzi elhelyezkedés, felhőzet) és egyéni tényezőtől (például a szabadban végzett tevékenységek természetétől és mennyiségétől) függ. Az UV-szűrős kontaktlencsék segítenek abban, hogy megóvja szemét a káros UV sugarakkal szemben. Azonban még nem készültek klinikai tanulmányok annak bemutatására, hogy az UV-szűrős kontaktlencsék viselésével a hályogok vagy más szembetegségek kialakulásának kockázata csökkenthető. További információkért forduljon kontaktlencse illesztőjéhez.

\*FIGYELMEZTETÉS: Az UV-szűrős kontaktlencsék NEM helyettesíthetik az UV-szűrős szemüvegeket (védőszemüvegeket, napszemüvegeket), mivel nem fedik le teljesen a szemet és annak környékét. Az előírásoknak megfelelően továbbra is használjon UV-szűrős szemüvegeket.



## Figyelmeztetések – amit a kontaktlencse viselésről tudnia kell



Alapvető fontosságú, hogy kövesse az illető utasításait a kontaktlencse megfelelő használatára és ápolására vonatkozóan. A kontaktlencsékkel kapcsolatos problémák súlyos szemsérüléseket eredményezhetnek. Ritka esetekben kialakulhat olyan szembetegség is (például szaruhártya-fekély), amely a látás elvesztéséhez vezethet. Egy tanulmány<sup>1</sup> eredményei az alábbiakat jelzik:

Azok között, akik csak nappal viselnek lencsét a szaruhártya-fekély előfordulási arányát 4,1-re becsülik (10 000 főből évente), míg kiterjesztett viselet esetén ez a szám 20,9-re nő.

Vagyis a szaruhártya-fekély veszélye kiterjesztett viselet esetén 4–5-ször nagyobb, mint nappali viseléskor.

Ha az összehasonlításnál figyelmen kívül hagyjuk azon kontaktlencse-viselőket, akik nappali viselet mellett a lencsét éjszaka is viselik, illetve azokat, akik a kiterjesztett viselést esetenként nappali viseletre váltják, akkor kiterjesztett viselet esetén a veszély 10–15-ször nagyobb.

A kiterjesztett viselésnél a kockázat annál nagyobb, minél több napig használják folyamatosan a lencsét az eltávolítások között, az első éjszakai viseléstől kezdődően.

A szaruhártyafekély kockázata becslések szerint 3–8-szor nagyobb a dohányzó kontaktlencseviselők között, mint a nemdohányzók körében.

A szaruhártyafekély veszélye csökkenthető a higiénias és lencsetisztítási szabályok (beleértve a lencsetok tisztítását is) pontos betartásával.

<sup>1</sup> New England Journal of Medicine, 1989. 09. 21., 321 (12), pp. 773-783

# Tisztítás

## Előkészületek a kontaktlencse behelyezésére

A tisztítás a megfelelő lencseápolás első és legfontosabb tényezője. Alakítson ki jó higiénias rutint a lencsék kezeléséhez.

- Mielőtt megérintené a lencsét, mindig alaposan mossa meg a kezét szappannal, gondosan öblítse le, és szárítsa meg egy olyan törülközővel, amiről nem válnak le textilszálak!
- Ne használjon olajos bázisú kozmetikumokat, arcápoló krémet, parfümszappant vagy egyéb krémeket a lencsehasználat előtt. Legjobb, ha a smink felhelyezése előtt felteszi lencséit. A vízes alapú kozmetikumok kisebb valószínűséggel károsítják a lencsét, mint az olajos bázisú termékek.
- Hajspray vagy más aeroszol használata közben szemét tartsa bezárva!
- Ha a kontaktlencsét sportolás (beleértve az úszást és egyéb vízi-sportokat) közben szeretné viselni, akkor kérjen tanácsot egy szakembertől!
- A lencsék kezelése, felhelyezése, eltávolítása, tisztítása, fertőtlenítése, tárolása és használata során mindig kövesse a kontaktlencse-illesztő által adott vagy az ebben a füzetben olvasott utasításokat!
- Soha ne viselje kontaktlencséit az előírtnál hosszabb ideig!



## A kontaktlencse csomagolása

A doboz kinyitásához hajtsa fel az elülső fület. A dobozban a lencsék egyenként, sterilen vannak becsomagolva. A doboz lezárásához hajtsa be a fület. NE használja a lencsét, ha a steril buborékcsoomagolást megbontották vagy sérült!


### **Az egyedi lencsecsomagolás felbontásához tegye a következőket:**

- 1.** Először válasszon le egy lencsét az ötös csíkról. Legyen óvatos, nehogy megsértse a többi lencse csomagolását!
- 2.** Rázza meg a csomagot, hogy a lencse szabadon lebegjen az oldatban!
- 3.** Húzza fel a fóliát! A lencse időként felragadhat a csomagolásra, de ez nem befolyásolja a lencse sterilitását, amelynek használata így is tökéletesen biztonságos.
- 4.** Érintse meg az ujjhegyével a kontaktlencsét, de legyen nagyon óvatos, nehogy megsértse a körmével. A sérülések elkerülése érdekében nem árt a körmeit mindig simára és rövidre vágni.
- 5.** Óvatosan vegye ki a lencsét úgy, hogy felcsúsztatja azokat a tároló oldalán! Soha ne használjon csipeszt vagy más eszközt!

## A lencsék felhelyezése előtt

- A felcserélés elkerülése érdekében az első lencsét mindig a jobb szemére illeszse.
- A lencsék felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e megkarcolva vagy megsérülve. Ha úgy tűnik, hogy valamilyen károsodás érte, dobja ki a lencsét és használja a következőt.
- Ellenőrizze, hogy a lencsék nincsenek-e kifordítva.
- Helyezze a lencsét mutatóujja hegyére és tartsa szemmagasságban: ekkor kívülről nézi a lencse homorú oldalát!

### 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsénél

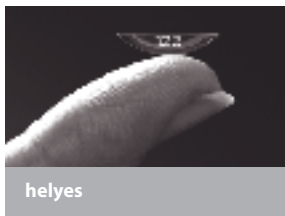

### Tippek a könnyű kezeléshez

A 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencséket egyszerűbb kezelni, ha kicsit hagyja azokat megszáradni: helyezze a lencsét a száraz mutatóujja hegyére és hagyja állni 5–10 másodpercig.

### MEGJEGYZÉS:

Ehhez a termékhez NE használjon kontaktlencse ápoló oldatokat. Tesztelést kontaktlencse ápoló oldatokkal nem végeztek. Az eltávolítás után dobja ki a lencsét.

## **A lencsék felhelyezése a szemre**

- 1.** Ne feledje el, hogy a jobb szemével kezdje. Vizsgálja meg a lencsét, és győződjön meg róla, hogy nincs kifordulva!
- 2.** Tegye a lencsét a mutatóujja hegyére, és ugyanennek a kezének középső ujját helyezze közel a szeméhez, és húzza le az alsó szemhéjat!
- 3.** A másik kéz mutatóujjával vagy középső ujjával húzza fel a felső szemhéjat, és a lencsét helyezze a szemre!
- 4.** Finoman engedje el mindkét szemhéjat, és pislogjon!
- 5.** Ismétlje meg ezeket a lépéseket a baloldali lencsével!

### **A lencse felhelyezésének vannak egyéb módszerei is!**

Ha a fenti módszert nehéznek találja, akkor kontaktlencse illesztője alternatív megoldásokat adhat.



## A lencsék középre igazítása

Felhelyezés után a lencse általában automatikusan a szem középső részére kerül, és csak nagyon ritkán fordul elő, hogy viselés közben elcsússzon a szem fehér részére. Azonban ez mégis előfordulhat, ha a felhelyezés és az eltávolítás nem megfelelően történt.

A lencse középre igazításához kövesse az alábbi módszerek egyikét:

- Csukja be a szemét, és a zárt szemhéjon keresztül finoman masszírozza a helyére a lencsét.

### **Vagy:**

- Nyitott szem mellett gyengéden terelje vissza az elcsúszott lencsét úgy, hogy ujjával nyomást fejt ki az alsó vagy a felső szemhéj szélére.

### **Megjegyzés:**

Ha látása elhomályosodott a lencsék felhelyezése után, akkor ellenőrizze az alábbiakat:

- Előfordulhat, hogy a lencse nincs a szem közepén. Ellenőrizze a fenti utasításokat!
- Ha a lencse a megfelelő helyen van, akkor vegye ki és vizsgálja meg az alábbiakat:
  - a) Ha kozmetikum vagy olaj került a lencsére, akkor dobja ki, és helyezzen fel egy újat!
  - b) Lehet, hogy a lencse nem a megfelelő szemem volt.
  - c) Lehet, hogy a lencse kifordult, ami azt is eredményezi, hogy viselése kevésbé kényelmes, mint normál esetben.

## A letapadó (el nem mozduló) lencsék kezelése

Ha a lencse a szemhez tapad, akkor a kontaktlencse illesztőjével felírathat egy síkosító vagy nedvesítő oldatot. Így a viselés közben benedvesítheti a lencsét, hogy kényelmesebb legyen.

Használjon néhány cseppet, és várjon addig, amíg a lencse elkezd szabadon mozogni a szemén.

**Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor AZONNAL keresse fel szemészét!**



## A lencsék eltávolítása

- Mindig ugyanazt a lencsét távolítsa el először.
- Mossa meg, öblítse le és szárítsa meg a kezét, és kövesse a „Tisztítás” című részben leírt higiéniai szabályokat.

### **Figyelmeztetés:**

Mindig győződjön meg arról, hogy a lencse a szeme közepén van, mielőtt megpróbálja eltávolítani!

Ennek megállapításához takarja le a másik szemét: ha látása elhomályosul, akkor a lencse vagy a szeme fehérijén van, vagy egyáltalán nincs a szemén. A lencse megkereséséhez vizsgálja meg a szem felső területét úgy, hogy egy tükör előtt lefelé néz, miközben felhúzza a felső szemhéjat.

Ezután az alsó szemhéj lehúzásával ellenőrizze az alsó területet.

Ha megtalálta a lencsét, akkor kiveheti azt a csippentős módszerrel, vagy az illesztője által javasolt bármilyen más módszerrel.



### **A csipentős módszer**

1. Nézzen felfelé, és mutatóujjával csúsztassa le a lencsét a szeme fehérjére!
2. Finoman csipentse össze a lencsét a hüvelyk- és mutatóujjával, majd óvatosan vegye ki!

## A lencsék ápolása

A folyamatosan biztonságos és kényelmes kontaktlencse használat érdekében mindig pontosan kövesse illesztője utasításait.

**NE HASZNÁLJON kontaktlencse tisztító szereket ehhez a termékhez! A lencseápolási rendszerek nem kerültek tesztelésre.**

A kivétel után dobja ki a lencsét. Ha nem tartja be a megfelelő lencseápolási utasításokat, az súlyos szemproblémák kialakulásához vezethet a „Figyelmeztetések – amit a kontaktlencse viselésről tudnia kell” című részben leírtak szerint.

## Ha elfogy a kontaktlencse

Fontos ügyelnie arra, hogy mindig elegendő csere lencse álljon rendelkezésre.

Ha el szeretné kerülni, hogy kifogyjon a lencséből, akkor hagyjon elegendő időt a megrendelésre és a lencsék elhozására a kontaktlencse illesztőjétől.

Ha bármilyen okból elfogy a kontaktlencséje, akkor viseljen szemüveget.



## Monovision korrekcióra vonatkozó utasítások

Ha szemésze monovision korrekciót javasol, akkor az alábbiakra kell figyelnie:

A látás kontaktlencsés korrekciója esetén előfordulhat, hogy látásbeli kompromisszumot kell kötnie.

Néhány esetben a monovision lencsék csökkenthetik a látásélességet és a mélységérzékelést távoli és közeli tárgyakkal. Néhány páciens nehezen alkalmazkodik ehhez.

Az olyan tünetek, mint az enyhe elmosódottság és a változó látásélesség rövid ideig vagy néhány hétig jelentkezhetnek, amíg a szemei megtanulnak alkalmazkodni. Minél hosszabb ideig tartanak ezek a tünetek, annál kisebb az esélye a sikeres alkalmazkodásra.

Ebben az időszakban a lencsét javasolt csak ismerős helyzetekben viselni, amelyek vizuálisan nem jelentenek nagy igénybevételt. Például amíg a szemei nem alkalmazkodtak, javasolt kerülni a gépjármű vezetést.

Néhány páciensnek a kontaktlencséje mellett a szemüvegét is viselnie kellhet ahhoz, hogy a fontos feladatok elvégzésekor a látásuk a lehető legtisztább legyen.

- Bizonyos esetekben a páciens látása sose lesz tökéletes gyenge fényviszonyok mellett (például éjszakai vezetés közben). A szemésze további lencsét írhat fel, hogy mindkét szemét korrigálják, amikor élesebb távollátásra van szüksége.

- A monovision korrekció viselésére vonatkozó döntést mindig egy szemésszel folytatott alapos konzultáció után kell meghozni.
- Kövesse a kapott tanácsokat annak érdekében, hogy könnyebben alkalmazkodjon a monovision korrekcióhoz. Mindig beszélje meg kontaktlencse illesztőjével kérdéseit vagy problémáit, melyek a szoktatási időszakban felmerülnek.

## Biztonsági ellenőrzés

Naponta legalább egyszer érdemes elvégeznie az alábbi egyszerű önvizsgálatot. Kérdezze meg önmagát:

1. Milyen érzés a lencsét viselni?
2. Hogy néz ki a szemem?
3. Továbbra is jól látok?

### **Azonnal vegye ki a lencsét, ha az alábbi problémák közül bármelyiket tapasztalja:**

- Viszkető, égő vagy csípő érzés a szemben.
- Ha úgy érzi, hogy valami van a szemében.
- Ha szeme túlságosan könnyezik, szokatlan váladék jelentkezik, vagy kivörösödik.
- Ha látása elmosódottá válik, szivárványt vagy fénykört lát a tárgyak körül. Ha a lencsét folyamatosan vagy túl hosszú ideig viseli, szeme kiszáradhat.
- Ha a lencse kevésbé kényelmes, mint akkor, amikor először felhelyezte.

Ha a kényelmetlen érzés vagy probléma megszűnik, amikor kiveszi a lencsét, akkor alaposan vizsgálja meg azokat, és keressen rajtuk sérülést, piszkot vagy idegen testet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye ki az új lencsét, és azonnal forduljon szemészéhez.

A fenti tünetek bármelyike fertőzésre vagy szemfekély kialakulására utalhat. A gyors diagnózis és kezelés rendkívül fontos ahhoz, hogy elkerülhesse szemei komolyabb károsodását.

**NE FELEJTSE EL! – A TÜNETEK FIGYELMEZTETŐ JELEK.  
HA KÉTSÉGEI VANNAK, VEGYE KI A LENCSÉKET!**

## Egyéb fontos információk

### Óvintézkedések

- Mielőtt távozna szemészétől, győződjön meg róla, hogy ki tudja venni kontaktlencséit!
- Azonnal vegye ki a lencséket, ha szeme kivörösödik vagy irritációt érez!
- Tájékoztassa orvosát arról, hogy kontaktlencsét visel!
- Bármilyen szemcsepp használata előtt kérje ki egy szakember véleményét!
- Bizonyos gyógyszerek (például az antihisztaminok, ödémacsökkentők, vízhajtók, izomlazítók, nyugtatók és az utazási betegség ellen használatos gyógyszerek) mellékhatásaként a szem kiszáradhat, és ettől a lencsék kényelmetlenné válhatnak, vagy homályos látás jelentkezhet. Ha problémát tapasztal, kérjen megfelelő orvosi segítséget!
- **Ha vegyszer kerül a szemébe: A SZEMET AZONNAL ÖBLÍTSE KI CSAPVÍZZEL. AZONNAL FORDULJON SZAKEMBERHEZ, VAGY KERESSE FEL A LEGKÖZELEBBI KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYÁT!**
- A fogamzásgátló tablettát szedő pácienseknél a látásélesség vagy a lencsetolerancia megváltozhat. Szemésze tanácsokat tud adni a probléma megoldásához!
- Mint minden kontaktlencsénél, a rendszeres szemvizsgálat elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizze szeme egészségét
- Soha ne engedje, hogy lencséit más viselje! Azok speciálisan az Ön szemére írták fel, és az Ön látását korrigálják a szükséges mértékben. Jelentősen növeli a szemfertőzések kockázatát, ha más is viseli az Ön lencséit.

- Az egészséges és kényelmes látás biztosításához fontos, hogy a 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsákat csak az illesztő által felírt módon használja. Ezek a lencsék kizárólag egyszeri nappali viselésre szolgálnak. Tartsa be a lencse viselésére és a lencse ápolására vonatkozó utasításokat! Jelen füzet ezen utasítások emlékeztetőjeként szolgál.
- Illesztőjét részletesen tájékoztassa egészségi állapotának előzményeiről, hogy az igényeinek megfelelő kontaktlencsét és ápolási rendszert írthasson fel Önnek!
- Amikor az illesztő által előírt csereidőtartam letelt, dobja el a 1•DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsét és cserélje le egy új, steril lencsepárra!
- Kérje ki illesztője véleményét a kontaktlencse viseléséről úszás és egyéb vízi sportok közben! Ha úszás vagy forró fürdőzés közben a lencse vízzel érintkezik, nő a mikroorganizmusok által okozott fertőzések veszélye!
- A lencse viselésekor kerülje az ártalmas vagy irritáló gőzöket és füstöt!
- Mindig tájékoztassa munkaadóját arról, hogy kontaktlencsét visel. Néhány munkakörben szükséges a szemvédő eszközök használata, illetve tiltott a kontaktlencse viselése.
- Ha bármilyen kérdése van, mindig kérdezze meg a kontaktlencse illesztőjét!

## Összefoglaló áttekintés

Mint minden kontaktlencsénél, vannak olyan alapvető irányelvek, amelyeket be kell tartania látásának védelme és javítása érdekében.

- Mindig kövesse a biztonságos lencseviselésre vonatkozó tanácsokat! A rendszeres szemvizsgálat fontos a tökéletes teljesítményű és egészséges látás megőrzéséhez.
- Létfontosságú a magas szintű higiénia fenntartása.
- SOHA ne viselje a lencsét az előírtnál hosszabb ideig!
- SOHA ne használjon csapvizet a lencsék tisztításához!
- Amennyiben problémát észlel (például szeme kivörösödik, a lencse irritálja, vagy a látása elhomályosul) AZONNAL távolítsa el a kontaktlencsét és keresse fel szemészét!
- Mindig legyen kéznél egy szemüveg, hogy kivehesse a kontaktlencsét, ha szükséges. Lehetséges, hogy a kontaktlencsét szereti jobban, de a szemüveg alapvető fontosságú tartalék.

A **1•DAY ACUVUE® TruEye™** kontaktlencse viselőjeként hamar észre fogja venni a szemüveggel és egyéb kontaktlencsékkel szembeni előnyöket.

A legtöbb előny megszerzéséhez és a maximális teljesítmény eléréséhez alapvető fontosságú felismernie, hogy mennyire fontos ezeknek az útmutatásoknak a betartása.

Csak az illetője által adott tanácsok és ez ebben a füzetben olvasott utasítások követésével viselje a kontaktlencsétet.

## Mellékhatások

A **1•DAY ACUVUE® TruEye™** viselése közben tapasztalt minden esetleges mellékhatást jeleznie kell szemészének!

# Az Ön adatlapja

## A 1-DAY ACUVUE® TruEye™ kontaktlencsék

**Jobb lencse:**

*Dioptria és bázisgörbület* \_\_\_\_\_

**Bal lencse**

*Dioptria és bázisgörbület* \_\_\_\_\_

## A LENCSEKET A KIVÉTEL UTÁN KI KELL DOBNI!

Ha bármilyen kérdése vagy panasa van, hívja fel kontaktlencse illesztőjét!

**Kontaktlencse illesztő címe és telefonszáma:**

\_\_\_\_\_

A rendszeres szemvizsgálat fontos a tiszta látás és az egészséges szem megőrzéséhez.

**A következő szemvizsgálatok időpontjai:**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_ 6. \_\_\_\_\_

Johnson & Johnson Kft.  
2045 Törökbálint  
Tó Park

**További információk**

A *1-DAY ACUVUE*® TruEye™ kontaktlencsével kapcsolatos további információért, valamint az ingyenes használati útmutatóért keress fel vevőszolgálatunkat!

**Illetékes leányvállalat (EU):**

Johnson & Johnson Vision Care, a Johnson&Johnson  
Medical Limited divíziója  
Pinewood Campus, Nine Mile Ride  
Wokingham, Berks RG40 3EW  
United Kingdom

**Magyarországi ügyfélszolgálat:**

Tel: 06-23-513-970, 06-23-513-930

Fax: 06-23-510-970

Ingyenes zöld szám: 06-80-266-266

e-mail: [acuvue-hu@its.jnj.com](mailto:acuvue-hu@its.jnj.com)

**[www.acuvue.hu](http://www.acuvue.hu)**