

1·DAY ACUVUE®
MOIST® BRAND
CONTACT
LENSES

1·DAY ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES












Használati útmutató

Egynapos kontaktlencsékhez



CE
0086

Az alábbi szimbólumokat láthatja a
1•DAY ACUVUE® MOIST® és **1•DAY ACUVUE®**
 UV-szűrős kontaktlencsék címkéjén vagy csomagolásán.

SZIMBÓLUM	DEFINIÓ
	Lásd a használati utasítást!
	Lejárat dátum
	Gyártási tétel száma
	Gőzzel vagy száraz hővel sterilizált
DIA	Átmérő
BC	Bázisgörbület
D	Dioptria (a lencse erőssége)
CT	Középvastagság
 0086	„CE” megfelelési jelölés
	UV-szűrés
	A hátsó fóliát távolítsa el!
	Helyes lencseállítás
	Kifordított lencse
	Környezetvédelmi termékdíj
	Figyelmeztetés: AZ USA törvényei szerint ezt a terméket csak az erre jogosult kontaktlencse-illesztő értékesítheti.

TARTALOMJEGYZÉK

Szimbólumok, jelzések	2
1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® kontaktlencse	4
Figyelmeztetések – amit feltétlenül tudnia kell a kontaktlencse viseléséről	6
Tisztítás	8
A kontaktlencse csomagolása	9
A lencsék felhelyezése előtt	10
A lencsék felhelyezése a szemre	11
A lencsék középre helyezése	12
A letapadó (el nem mozduló) lencsék kezelése	13
A lencsék eltávolítása	14
A csípéses módszer	15
Mi a teendő, ha elfogy a kontaktlencsénk?	16
„Monovision” korrekcióra vonatkozó utasítások	16
Biztonsági ellenőrzés	18
Egyéb fontos információk	19
Összefoglaló áttekintés	21
Mellékhatások	22
Az Ön adatlapja	23

1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® kontaktlencse

Biztonságos, kényelmes, könnyen használható

Gratulálunk Önnek, hogy csatlakozott ahhoz a több millió emberhez, akik világszerte élvezik a Johnson & Johnson, a világ vezető kontaktlencse-gyártója által készített 1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® kontaktlencse kényelmét és egyszerű használatát.

A 1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® lencsék puhák, vékonyak és rugalmasak. Ez kezdettől fogva kényelmessé teszi viselésüket és biztosítja a folyamatos oxigénáramlást, mely segít megőrizni szemei frissességét és egészségét. A lencsék ezen felül védelmet nyújtanak az ultraibolya-sugarak (UV) ellen is.*

A könnyebb kezelhetőség érdekében a 1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® kontaktlencséket halvány színezettséggel láttuk el, illetve jelzés segít felismerni, ha a kontaktlencse kifordított állapotban van.

Gyártástechnológiai áttörés révén sikerült a 1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® lencsék előállítási költségeit csökkentenünk, ezáltal olyan kedvező árat tudunk biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy Ön naponta lecserélhesse kontaktlencséjét.



Ez azt jelenti, hogy lecserélheti a lencsét mielőtt a lerakódások és az „öregedés” csökkentené a lencse hatékonyságát. Így minden egyes nap biztosított a tökéletes látás, a kényelem és az egészség.

Akárcsak az összes kontaktlencse, a 1-DAY ACUVUE® MOIST® és a 1-DAY ACUVUE® is gyógyászati segédeszköz. Kontaktológusa által nyújtott folyamatos tanácsadás és a rendszeres szemvizsgálat alapvető fontosságú ahhoz, hogy hosszú távon megőrizhesse szemei egészségét. Egynapos kontaktlencse viselése esetén nincs szükség kontaktlencse ápoló folyadék használatára!

A 1-DAY ACUVUE® MOIST® és 1-DAY ACUVUE® kontaktlencse javasolt hordási ideje egy nap. Minden egyes kontaktlencse csak egy alkalommal használható!

Helyezzen be minden reggel egy friss, új pár lencsét, majd dobja el a nap végén. Ez a lehető legegészségesebb és legegyszerűbb módja a kontaktlencse viselésnek



Figyelmeztetések – amit feltétlenül tudnia kell a kontaktlencse viselésről

Alapvető fontosságú, hogy kövesse kontaktológusa kontaktlencseviselésre és ápolásra (beleértve a lencsetartó tok ápolását is), valamint lencseápoló termékekre vonatkozó utasításait. A kontaktlencsékkel vagy a lencseápoló termékekkel kapcsolatos problémák súlyos szemsérüléseket okozhatnak.

A kontaktlencse-viselők körében ritkán előfordulhat, hogy szembetegség, többek között szaruhártya-fekély alakul ki, ami a látás elvesztéséhez vezethet. A vizsgálati eredményeket¹ az alábbiakban ismertetjük:

Azok között, akik csak nappal viselnek lencsét a szaruhártya-fekély előfordulási arányát 4,1-re becsülik (10 000 fő évente), míg kiterjesztett (nappali és éjszakai) viselet esetén ez a szám 20,9-re nő. Vagyis a szaruhártya-fekély veszélye kiterjesztett viselet esetén 4–5-ször nagyobb, mint nappali viseléskor.

Ha az összehasonlításnál figyelmen kívül hagyjuk azon kontaktlencse-viselőket, akik nappali viselet mellett a lencsét éjszaka is viselik, illetve azokat, akik a kiterjesztett viselést esetenként nappali viseletre váltják, akkor kiterjesztett viselet esetén a veszély 10–15-ször nagyobb.

Azoknál a kontaktlencse-viselőknél nő a kockázat, akik a lencsét megszakítás nélkül használják.

¹ New England Journal of Medicine, September 21, 1989

A szaruhártyafekély kockázata becslések szerint 3–8-szor nagyobb a dohányzó kontaktlencseviselők között, mint a nemdohányzók körében.

A szaruhártyafekély veszélye csökkenthető a higiénias és a lencsetisztítási szabályok – ideértve a lencsetok tisztítását is – pontos betartásával.

* FIGYELMEZTETÉS: Az UV-szűrős kontaktlencsék NEM helyettesíthetik az ultraibolya-sugarakat szűrő szemüvegeket (védőszemüvegek, napszemüvegek), mivel a lencsék nem fedik le teljesen a szemet és a szem környékét. Az utasításoknak megfelelően továbbra is használnia kell az UV-szűrős szemüvegeket.

Megjegyzés:

Ha szemét hosszú ideig éri ultraibolya-sugárzás, növekszik a szürkehályog kialakulásának veszélye. A veszélyeztetettség mértéke számos tényezőtől függhet: környezeti hatások (tengerszint feletti magasság, földrajzi elhelyezkedés, felhőtakaró) és személyes tényezők (szabadban végzett tevékenységek hossza és jellege). Az UV-szűrős kontaktlencsék segítenek abban, hogy megóvja szemét a káros UV-sugarakkal szemben. Akárhogyan is, klinikai vizsgálatok még nem bizonyították, hogy az UV-szűrős kontaktlencsék csökkenthetik a szürkehályog vagy más elváltozások kialakulásának veszélyét. További információért forduljon szakemberhez.

Tisztítás

Előkészületek a kontaktlencse behelyezésére

A tisztítás a megfelelő lencseápolás első és legfontosabb tényezője.

- Mielőtt megérintené a lencsét, mindig alaposan mossa meg a kezét szappannal, gondosan öblítse le, és szárítsa meg egy olyan törülközővel, amiről nem válnak le textilszálak!



- Ne használjon lipid alapú kozmetikumokat, arcápoló krémet, parfümszappant vagy egyéb krémeket lencsehasználat előtt! Legjobb, ha arcápolás előtt felteszi lencséit. A víz alapú kozmetikumok kisebb valószínűséggel károsítják a lencsét, mint a lipid alapú termékek.
- Hajspray vagy más aeroszol használata közben szemét tartsa bezárva!
- Ha a kontaktlencsét sportolás közben szeretné viselni, kérje kontaktológusa tanácsát!
- A lencsék kezelése, felhelyezése, eltávolítása, fertőtlenítése, tárolása és használata során mindig kövesse a kontaktológusa által adott vagy e füzetben olvasott utasításokat és tanácsokat!
- Soha ne használja kontaktlencséit az előírtnál hosszabb ideig!



A kontaktlencse csomagolása

A doboz kinyitásához hajtsa fel az elülső fület! A dobozban 6 darab 5 lencsét tartalmazó csíkot talál, vagyis összesen 30 darabot. A lencsék egyenként, sterilen vannak becsomagolva. A doboz lezárásához hajtsa le a fület!

Ne használja a lencsét, ha a steril buborékcsomagolást felnyitották vagy sérült!

Az egyedi lencsecsomagolás felbontása:

1. Válasszon le egy buboréktárolót az ötös csíkról. Legyen nagyon óvatos, nehogy megsértse a többi lencse csomagolását!
2. Rázza meg a csomagot, hogy a lencse szabadon lebegjen az oldatban!
3. Húzza fel a fóliát! A lencse időként felragadhat a tároló doboz oldalára vagy a fóliára, de ez egyáltalán nem befolyásolja a sterilitást, a használata így is biztonságos.
4. Érintse meg az ujjhegyével a kontaktlencsét, de legyen nagyon óvatos, nehogy megsértse a körmével. A sérülések elkerülése végett nem árt a körmeit mindig simára és rövidere vágni.
5. Óvatosan vegye ki a lencsét úgy, hogy felcsúsztatja azokat a tároló oldalán! Soha ne használjon csipeszt vagy más szerszámot!



A lencsék felhelyezése előtt

A problémák elkerülése érdekében először mindig a jobb szemére illessze a lencsét!

A lencsék felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e megkarcolva vagy megsérülve! Ha úgy tűnik, hogy valamilyen károsodás érte, dobja ki a lencsét és használja a következőt!

Ellenőrizze, hogy a lencsék nincsenek-e kifordítva! Helyezze a lencsét mutatóujja hegyére és tartsa szemmagasságban: ekkor kívülről nézi a lencse homorú oldalát!

A 1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® esetében



Illesztési tippek

Sokkal egyszerűbb kezelni a 1•DAY ACUVUE® MOIST® és 1•DAY ACUVUE® kontaktlencséket, ha néhány másodpercig hagyja őket a levegőn száradni: helyezze a lencsét a száraz mutatóujja hegyére és hagyja állni 5–10 másodpercig. Ezután a lencse formája jobban tart, és így egyszerűbb megállapítani azt is, ha ki van fordítva.

Megjegyzés:

Amennyiben le kell öblítenie a lencsét felhelyezés előtt, csak friss, steril ápoló folyadékot használjon.

SOHA NE HASZNÁLJON CSAPVIZET!

A lencsék felhelyezése a szemre

1. Ne felejtse el, hogy a jobb szemével kezdje! Miután megvizsgálta a lencsét és biztos abban, hogy nincsenek kifordítva, tegye az egyik lencsét száraz mutatóujja hegyére!
2. Helyezze ugyanennek a kezének a középső ujját alsó szempillái alá, és húzza le az alsó szemhéjat!
3. A másik kéz mutatóujjával vagy középső ujjával húzza fel a felső szemhéjat, és a lencsét helyezze a szemre!
4. Finoman engedje el mindkét szemhéjat, és pislogjon!
5. Ismételje meg ugyanezt a másik szemmel!

Vannak más módszerek is a lencse felhelyezésére. Ha a fenti módszert nehéznek találja, kérje szakember tanácsát!



A lencsék középre helyezése

Felhelyezés után általában a lencse automatikusan a szem közepére úszik, és csak ritkán fordul elő, hogy elcsúszik. Ez azonban megtörténhet, ha a felhelyezést és a kivételt nem megfelelő módon végzi. A lencsék középre helyezésére az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

Zárja le szemhéjait, és finoman masszírozza a lencsét a helyére a szemhéján keresztül!

Vagy: Nyitott szem mellett gyengéden húzza vissza az elcsúszott lencsét úgy, hogy ujjával nyomást fejt ki az alsó vagy a felső szemhéj szélére!

Megjegyzés:

Ha látása elmosódott a lencsék felhelyezése után, ellenőrizze az alábbiakat:

- Lehet, hogy a lencse nincs a megfelelő helyen: tekintse át a fent megadott utasításokat!
- Ha a lencse a megfelelő helyzetben van, vegye ki és vizsgálja meg az alábbiakat:
 - a) Amennyiben kozmetikum vagy olaj került a lencsére, dobja ki és tegyen be egy újat!
 - b) Lehet, hogy a lencse rossz szemem volt.
 - c) Lehet, hogy a lencsét kifordítva tette fel, ami azt is eredményezi, hogy viselése kevésbé kényelmes.

A letapadó (el nem mozduló) lencsék kezelése

Ha a lencse a szemhez tapad, használja az orvosa által felírt kenő vagy nedvesítő oldatot! Nedvesítse meg a lencsét viselés közben, hogy kényelmesebb legyen! Csak néhány cseppet használjon, és várjon addig, amíg a lencse elmozdul! Ha ez nem oldja meg a problémát, **AZONNAL** forduljon szakemberhez!



A lencsék eltávolítása

Alaposan mossa meg, öblítse le és szárítsa meg a kezét! Kövesse ugyanazokat a higiéniai szabályokat, amelyeket a „Tisztítás” című fejezetben leírtunk!

Mindig ugyanazt a lencsét vegye ki először!

Óvintézkedés:

Mielőtt megpróbálja eltávolítani a lencsét, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a lencse a szemgolyó közepén van!

Ezt úgy állapíthatja meg, hogy letakarja a másik szemét. Ha látása elhomályosul, akkor a lencse vagy a szeme fehérjén van vagy egyáltalán nincs a szemén. A lencse helyének meghatározásához ellenőrizze a szem felső területét úgy, hogy egy tükör előtt lefelé néz, miközben felhúzza a felső szemhéjat!

Ezután az alsó szemhéj lehúzásával ellenőrizze az alsó területet!

Amikor megtalálta a lencsét, kiveheti azt a csípéses módszerrel, vagy bármilyen más módszerrel, amelyet kontaktológusa javasol.

A csípéses módszer

1. Nézzon felfelé, és mutatóujjával csúsztassa le a lencsét a szeme fehérjére!
2. Finoman csípje össze a lencsét hüvelyk- és mutatóujjával, aztán óvatosan vegye ki!



Mi a teendő, ha elfogy a kontaktlencsénk?

Fontos, hogy mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő mennyiségű kontaktlencse álljon rendelkezésére a napi cseréhez.

Ha el szeretné kerülni, hogy kifogyjon a lencséből, mindig időben rendelje meg illesztőjétől az új dobozt, hiszen mind a rendelés, mind a kiszállítás néhány napot vesz igénybe.

A *1•DAY ACUVUE® MOIST®* és *1•DAY ACUVUE®* egy napos, egyszeri használatú kontaktlencse. Használata nem igényli ápolófolyadék alkalmazását.

Ha bármilyen okból elfogyna a kontaktlencséje, viseljen szemüveget.

Habár a *1•DAY ACUVUE® MOIST®* és *1•DAY ACUVUE®* kontaktlencsék kiváló látáskorrekciót biztosítanak, a szemüvegek alapvető támogatást nyújthatnak minden kontaktlencse viselő számára.

„Monovision” korrekcióra vonatkozó utasítások

Amennyiben kontaktlencse illesztője presbyopia (öregkori távollátás) miatt önnek „monovision” korrekciót (az egyik szemén

a távoli, a másik szemén az olvasó korrekciót viseli) javasol, akkor az alábbiakra kell figyelnie:

A látás kontaktlencsés korrekciója esetén előfordulhat, hogy kompromisszumot kell kötnie, ami csökkent látásélességet is jelenthet. Néhány „monovision” korrekciót viselő páciens csökkent mélységérzékelésről számolt be. Közülük néhányan nehezen alkalmazkodtak ehhez.

Az olyan tünetek, mint az enyhe elmosódottság, változó látásélesség rövid ideig vagy néhány hétig jelentkezhetnek, amíg szeme alkalmazkodik az új helyzethez. Minél hosszabb ideig tartanak ezek a tünetek, annál rosszabbak a sikeres alkalmazkodás esélyei.

Ezen időszak alatt tanácsos a lencsét csak olyan helyzetben viselni, ami vizuálisan nem jelent nagy igénybevételt. A szoktatási periódusban például tanácsos lehet elkerülni az autózást.

Néhány páciensnek szüksége lehet arra is, hogy kontaktlencséje mellett a szemüvegét is viselje, hogy kritikus feladatok elvégzésekor látása a lehető legtisztább legyen.

- Néhány beteg látása nem tökéletes gyenge fényviszonyok között, például éjszakai vezetés közben. Ilyen esetben kontaktológusa további lencsét írhat fel, hogy mindkét szemét korigálják, amikor élesebb távollátásra van szükség.
- A „monovision” korrekció viselésére vonatkozó döntést mindig szakemberrel folytatott alapos konzultációnak kell megelőznie.

- Kövesse a szakember tanácsait annak érdekében, hogy könnyebben alkalmazkodjon a „monovision” korrekcióhoz! Mindig beszélje meg kontaktológusával problémáit, melyek a szoktatási időszakban felmerülnek!

Biztonsági ellenőrzés

Legalább naponta egyszer végezze el az alábbi egyszerű vizsgálatot!

Kérdezze meg önmagát:

1. Milyen érzés a lencsét viselni?
2. Hogy néz ki a szemem?
3. Továbbra is jól látok?

Azonnal vegye ki a lencsét, ha fellép az alábbi problémák bármelyike:

- Viszkető, égő vagy csípő érzés a szemben.
- Ha úgy érzi, hogy valami van a szemében.
- Ha szeme túlságosan könnyezik, szokatlan váladék jelentkezik vagy kivörösödik.
- Ha látása elmosódottá válik, szivárványszíneket vagy fénykört lát a tárgyak körül. Ha a lencsét folyamatosan vagy túl hosszú ideig viseli, szeme kiszáradhat.
- Ha a lencse kevésbé kényelmes, mint akkor, amikor először feltette.

Ha a kényelmetlen érzés vagy probléma megszűnik, amikor kiveszi a lencsét, akkor alaposan vizsgálja meg, hogy nem károsodtak-e a lencsék, nem szennyeződtek-e, vagy nincs-e rajtuk idegen test. Ha igen, dobja el a lencsét és tegyen fel egy újat!

Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki az új lencsét, és azonnal forduljon szakemberhez!

A fenti tünetek bármelyike fertőzésre vagy szemfekély kialakulására utalhat. Az azonnali diagnózis és kezelés rendkívül fontos ahhoz, hogy elkerülhessen egy esetleges szemkárosodást.

**NE FELEJTSE EL! – A TÜNETEK FIGYELMEZTETŐ JELEK.
HA KÉTSÉGEI VANNAK, VEGYE KI A LENCSÉKET!**

Egyéb fontos információk

Elővigyázatossági intézkedések

- Mielőtt távozna kontaktológusától, bizonyosodjon meg arról, hogy ki tudja venni kontaktlencséit!
- Mint minden kontaktlencse viselésekor, a rendszeres szemvizsgálat elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizze szeme egészségét.
- Azonnal vegye ki a lencsét, amennyiben szeme kivörösödik vagy a lencse irritálja!
- Tájékoztassa orvosát arról, hogy kontaktlencsét visel!

- Bármilyen szemcsepp használata előtt kérje szakember tanácsát!
- Bizonyos gyógyszerek, pl. az antihisztaminok, dekongesztív gyógyszerek, vizelethajtók, izomrelaxánsok, nyugtatók és az utazási betegség ellen használatos gyógyszerek mellékhatásaként a szemben lévő lencsék kényelmetlenné válhatnak, illetve a látásélesség csökkenhet. Ha problémát tapasztal, kérje ki kontaktológusa tanácsát!
- Amennyiben vegyszer kerül a szemébe: **A SZEMET AZONNAL ÖBLÍTSE KI CSAPVÍZZEL! KÉSEDELEM NÉLKÜL FORDULJON SZAKEMBERHEZ, VAGY KERESSE FEL A LEGKÖZELEBBI KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYÁT!**
- Azon személyeknél, akik fogamzásgátló tablettát szednek, a látásélesség vagy a lencsetolerancia megváltozhat. A probléma megoldására kérje kontaktológusa tanácsát!
- Soha ne engedje, hogy lencséit más viselje! Azok speciálisan az Ön szeméhez illeszkednek, illetve az Ön szemét korrigálják. Jelentősen növeli a szemfertőzés kockázatát, ha más is viseli az Ön lencséit.
- Egészsége megőrzése és a kényelem biztosítása érdekében fontos, hogy a **1•DAY ACUVUE® MOIST®**, és **1•DAY ACUVUE®** kontaktlencséket csak a kontaktológusa által felírt módon használja. Tartsa be a lencse viselésére, a lencse cseréjére vonatkozó utasításokat! Jelen tájékoztató füzet emlékeztetőül szolgál.
- Kontaktológusát minden, az egészségi állapotával kapcsolatos múltbeli tényről tájékoztatnia kell, hogy olyan kontaktlencsét írhasson fel, ami az Ön igényeinek pontosan megfelel.



- Amikor a kontaktológusa által előírt csereidőtartam letelt, dobja el a *1•DAY ACUVUE® MOIST®* és a *1•DAY ACUVUE®* kontaktlencsét és cserélje le egy új, steril lencsepárra!
- Kérdezze meg kontaktológusát, hogy a lencsét sportolás (pl. vízisportok) közben viselheti-e! Amennyiben úszás közben a szemet víz éri, a szem fertőződésének veszélye megnő!
- A lencse viselésekor kerülje az ártalmas vagy irritáló gőzöket és füstöt!
- Mindig tájékoztassa munkaadóját arról, hogy kontaktlencsét visel. Néhány munkakörben szükséges a szemvédő eszközök használata, illetve tiltott a kontaktlencse viselése.
- Ha bármilyen kérdése van, mindig forduljon kontaktológusához!

Összefoglaló áttekintés

Minden kontaktlencse-típus esetében vannak olyan alapvető irányelvek, amelyeket be kell tartania látásának megőrzése, illetve javítása érdekében.

- Mindig kövesse a biztonságos lencseviselésre vonatkozó tanácsokat! A rendszeres szemvizsgálat fontos a tökéletes látás eléréséhez és az egészség megőrzéséhez.
- Életbevágó fontosságú a magas szintű higiénia fenntartása.
- SOHA ne viseljen lencsét alvás közben, vegye ki azokat minden este!

- Csak tiszta lencsákat tegyen a szemére!
- SOHA ne viselje a lencsákat az előírtnál hosszabb ideig!
- SOHA ne használjon csapvizet a lencsék tisztítására!
- Amennyiben problémát észlel, például a lencse irritálja a szemét, és az kivörösödik, vagy a látása elhomályosul, AZONNAL távolítsa el a kontaktlencsét és keressen fel egy szakembert!
- Mindig legyen Önnél szemüveg, hogy kivehesse a kontaktlencséit, ha szükséges! Bár lehetséges, hogy a kontaktlencsét szereti jobban, a szemüveg életbevágó fontosságú tartalék.

Kövesse kontaktológusa viselési előírásait, hogy maximálisan kihasználhassa a *1•DAY ACUVUE® MOIST®* és *1•DAY ACUVUE®* lencse előnyeit!

Hamarosan tapasztalni fogja, hogy ezek a kontaktlencsék mekkora előnyt nyújtanak egy szemüveggel szemben.

A kényelmes és egészséges kontaktlencse-viselés érdekében kérjük, tartsa be a szakorvosa által előírt, és a jelen tájékoztató füzetben részletezett utasításokat.

Mellékhatások

Amennyiben bármilyen mellékhatást észlel a *1•DAY ACUVUE® MOIST®* vagy *1•DAY ACUVUE®* kontaktlencsék viselésekor, azonnal jelezze azt kontaktológusának!

Az Ön adatlapja

1•DAY ACUVUE® MOIST®, 1•DAY ACUVUE®

Jobb lencse:

Dioptria és bázisgörbület _____

Bal lencse

Dioptria és bázisgörbület _____

Önnek 1•DAY ACUVUE® MOIST® vagy 1•DAY ACUVUE® kontaktlencsét írtak fel napi használatra.

Amennyiben bármilyen kérdése van, hívja kontaktológusát!

Kontaktológusa címe és telefonszáma:

A rendszeres szemvizsgálat fontos a tiszta látáshoz és szeme egészségének megőrzéséhez.

A szemvizsgálatok időpontjai:

1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____ 6. _____

Johnson & Johnson Kft.
2045 Törökbálint
Tó Park

További információk

A *1-DAY ACUVUE® MOIST®* és *1-DAY ACUVUE®* kontaktlencsével kapcsolatos további információért, valamint az ingyenes használati útmutatóért keres fel vevőszolgálatunkat!

Illetékes leányvállalat (EU):

Johnson & Johnson Vision Care, a Johnson & Johnson
Medical Limited divíziója
Pinewood Campus, Nine Mile Ride
Wokingham, Berks RG40 3EW
United Kingdom

Magyarországi ügyfélszolgálat:

Tel: 06-23-513-970, 06-23-513-930

Fax: 06-23-510-970

Ingyenes zöld szám: 06-80-266-266

e-mail: acuvue-hu@its.jnj.com

www.acuvue.hu